

# Codonics Virtua (PPU) 光盘锁定

## 简介

该文档详细阐述了“光盘锁定”的 Virtua® PPU 光盘制作系统的使用方法。区别于普通 Virtua, Virtua XR, 以及 Virtua ECO 光盘制作系统, Virtua PPU 光盘锁定的光盘制作系统只能使用 Codonics 及其代理商提供的光盘。

## Virtua PPU 光盘锁定特点

### 根据所安装的按光盘计数 (PPU) 激活码刻录光盘

Virtua PPU 型号的使用不仅需要安装墨盒与介质, 还需要有 PPU 激活码。PPU 激活码可使用次数信息可以简单的通过 Virtua 仪表盘查看。



每次从 Codonics 及其代理商购买的光盘都会得到相应的 PPU 激活码, 可以通过安装一个有效的 PPU 激活码将使用次数添加到系统中。通过管理员帐户登录 Virtua 并在操作界面中的“通用”->“应用”里安装 PPU 激活码。屏幕上显示了未使用过的或者是未过期的常规激活码和 PPU 的激活码。用户可以通过“输入激活码”触摸键输入常规和 PPU 激活码。



当一个新的 PPU 激活码 (起始数字为 99) 被输入后, 有效的可使用计数将立即显示在系统中。在 PPU 激活码被安装的同时, 会同时产生一个有效的使用天数信息。剩余的使用计数和剩余的使用天数会显

示在“管理特性激活码”窗口中。当 PPU 激活码过期时, 任何未被使用的计数将失效。激活码在过期之后不能重复使用。



当用户在刻录一个任务时, 系统将根据实际的每一次抓盘扣除相应的使用计数。当使用计数值低 (请参阅下列的 lowUsesLevel 设置) 或者是 PPU 激活码在 10 天之内将过期时, 系统将在仪表盘上显示一个提示信息。



当所有有效的计数都被使用或者激活码过期时, 系统将无法继续刻录光盘并显示一个报错信息直到新的激活码被输入系统。

最低使用数量提示可以通过预安装在智能 U 盘上 \profiles 文件夹下面的系统配置文件 -system.txt- 中的 lowUsesLevel 参数来进行设定。

参数: lowUsesLevel  
设定范围: 1 - 10000  
默认值: 50  
描述: 用于设定系统提示剩余使用计数值过低时的值

当“剩余使用计数”值大于“最低使用数量”4 倍时, 仪表盘上显示“满”状态当“剩余使用计数”值小于“最低使用数量”4 倍时并且大于“最低使用数量”值时, 仪表盘显示实际的“剩余使用计数”值。

例如, 如果“最低使用数量”值为 50, 如果当前的实际“剩余使用计数”值为 300, 那么仪表盘信

息显示“满”。如果当前实际的“剩余使用计数”值小于 200，那么仪表盘将显示剩余数量的百分比（以 200 为基础）。

储存在智能 U 盘上的所有 PPU 激活码信息会根据使用或者安装新码的过程中被更新并且记录在日志文件中。该日志文件（ppu.log）可以通过日志文件光盘或者是屏幕操作界面的“应用”->“查看日志”->“诊断”中获得。推荐使用远程网页浏览的方式获取日志文件。

该日志文件信息包含了每一个被安装在该智能 U 盘中的 PPU 激活码，使用量总数，剩余使用数，以及过期的 PPU 激活码。

### 智能 U 盘硬件

与普通的 Virtua 系统相比，Virtua PPU 所使用的是不同型号的智能 U 盘。该 U 盘安全储存了 PPU 和常规激活码。它同样也储存了其他的配置信息（配置文件，影像查看器，光盘标签）。

**注意：**如果智能 U 盘从 Virtua PPU 上被移除并插入到一台 PC 上进行 Virtua PPU 设置时，PC 上会弹出一个对话框安装新的硬件驱动。该对话框可以被安全取消。建议尽可能的通过网络访问智能 U 盘进行设置。

**注意：**建议在关机之后移除智能 U 盘，开机状态下移除 U 盘可能导致系统崩溃。

### 技术支持

如果在安装的过程中出现任何问题，请联系科多尼克 Codonics 中国地区售后技术支持部门

免费热线：+86-800-820-8635

Email: support@codonics.com

网站: www.codonics.com.cn

*Get it all with just one call*  
**+86-800-820-8635**

所有注册和未注册的商标都属于各自相关的业主，本公司有权在不发布通知的情况下修改产品功能参数表。

版权所有 © 2011 Codonics, Inc. 文档产品编号：901-444-001.01



上海市长宁区仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 1412 室  
电话：+86 21- 62787701  
传真：+86 21- 62787719  
info@codonics.com  
www.codonics.com.cn